


# COSMOS DECKENLIFTER

## KURZANLEITUNG




## Komponenten

Stationäre Konfiguration

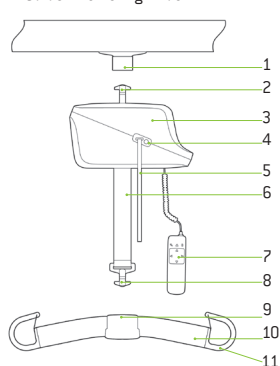


Tragbare Konfiguration

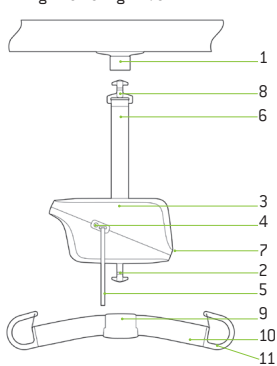

### Komponenten:

1. Cosmos Schienenauflrollen/Adapter
2. Ankerschlüssel
3. Lifter
4. Notstopp-Knopf
5. Band für die Notabsenkung
6. Lifterband
7. Handsteuerung
8. Ankerschlüssel
9. Verriegelungsmechanismus
10. Hebebügel
11. Haken

## Funktionen der Handsteuerung

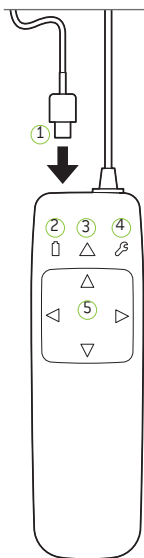


(1) USB-C		Zum Laden und zum Übertragen der Lifter-Daten
(2) Batterie-Symbol		Grünes Licht, ein: Der Batteriestand ist völlig-normal. Grünes Licht, blinkend: Zeit, die Batterie aufzuladen. Das Batteriesymbol blinkt auch während des Ladevorgangs, aber die Pfeilsymbole sind ausgeschaltet. Grünes Licht, schnell blinkend: Der Batteriestand ist kritisch niedrig. Der Lifter kann eine pflegebedürftige Person nur noch absenken. Der Lifter muss sofort aufgeladen werden, um Fehlfunktionen zu vermeiden. Kein Licht: Nach dem Aufladen bis zum vollen Batteriestand verschwindet das Batteriesymbol (Schlafmodus).
(3) Warnsymbol		Gelbes Dauerlicht und gleichzeitig grünes Dauerlicht im Pfeil „nach unten“ zeigen Überlastung oder Überhitzung an, und es ist nur die Absenkfunktion verfügbar.
(4) Wartungs-symbole		Dauerhaft gelbes Licht: Das Wartungsintervall des Lifters wurde erreicht. Wartung und jährliche Inspektion müssen durchgeführt werden.
(5) Ein / „nach oben“ und „nach unten“		Drücken Sie eine beliebige Taste. Der Lifter ist eingeschaltet und einsatzbereit. Die grün beleuchteten Pfeile sind die verfügbaren Funktionen, „nach oben“ und „nach unten“.
Warndreieck und Schlüssel		Dauerhaft gelbes Licht: Fehlfunktion, oder das Wartungsintervall des Lifters ist abgelaufen. Es ist nicht mehr sicher, den Lifter zu benutzen. Die Wartung muss sofort durchgeführt werden. Wenden Sie sich an einen zertifizierten Techniker (siehe Tabelle zur Fehlerbehebung).

## Vor der Verwendung des Lifters

### Inspektion vor der Verwendung

Überprüfen Sie die Schnellverbindungen, bevor Sie den Lifter benutzen: Die grüne Markierung auf dem Ankerschlüssel muss sowohl am Hebebügel als auch am Lifter sichtbar sein, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

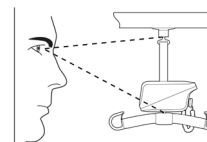

**Tägliche Inspektion** – Überprüfen Sie den Lifter vor der Benutzung stets auf sichtbare Anzeichen von Schäden. Vergewissern Sie sich, dass der Lifter korrekt auf dem Distanzband oder der Schienenauflrolle sowie auf dem Hebebügel montiert ist. Überprüfen Sie Hebegurte und Bänder vor dem Gebrauch immer auf Anzeichen von Verschleiß. Nicht verwenden, wenn Verschleiß erkennbar ist.

**Monatliche Inspektion** - Prüfen Sie das komplette Hebeband auf Schäden oder Verschleiß. Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, führen Sie dazu die Prüfung über die gesamte Länge des Hebebands durch.

**Jährliche Inspektion** - Der Lifter muss mindestens einmal jährlich von einer für Human Care-Produkte qualifizierten Person und in Übereinstimmung mit der Human Care-Richtlinie überprüft werden.

## Anheben

**Senken Sie das Hebeband** auf eine bequeme Arbeitshöhe ab. Verbinden Sie einen geeigneten Hebebügel mit dem Lifter (lesen Sie im Benutzerhandbuch nach, wie Sie den Hebebügel verbinden).

**Verwenden Sie die Handsteuerung**, um den Hebebügel direkt über der pflegebedürftigen Person zu positionieren.

**Befestigen Sie den Hebegurt** zuerst mit den Hebegurtschlaufen am Hebebügel, dann mit den Beinschlaufen.

**Heben Sie die pflegebedürftige Person mit dem Lifter leicht an und führen Sie einen Sicherheitscheck durch, dann fahren Sie mit dem transfer fort.**

**Halten Sie die Haken** nicht fest, während Sie einen Hebevorgang durchführen.

**Benutzen Sie den Hebebügel** nicht, um die pflegebedürftige Person und den Lifter zu bewegen.

## Allgemeine Pflege

	Reinigen Sie mit einem leicht angefeuchteten Tuch und wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach.
	Verwenden Sie niemals starke Reinigungsmittel am Deckenlifter.
	Aktivieren Sie den Notstopp, wenn der Lifter nicht benutzt wird.
	Laden Sie den Lifter jede Nacht auf.
	Desinfizieren.
	Nicht in Wasser eintauchen.



**Wichtig!** Benutzen Sie den Griff, wenn Sie den Lifter transportieren. Benutzen Sie nicht das Hebeband oder das Kabel der Handsteuerung!

## Fehlersuche

**Wenn Sie Probleme mit dem Lifter haben, lesen Sie bitte im Benutzerhandbuch nach.**

**Wenn nichts passiert**, wenn die „nach oben“- oder „nach unten“-Taste auf der Handsteuerung gedrückt wird.

1) Die Batterien sind vollständig entladen. Laden Sie den Lifter umgehend. 2) Der Not-Stopp ist herausgezogen. Deaktivieren Sie die Funktion, indem Sie den Knopf wieder hineindrücken.

**Wenn nichts passiert**, wenn die „nach oben“- oder „nach unten“-Taste auf der Handsteuerung gedrückt wird und die Serviceanzeige aufleuchtet.

1) Prüfen Sie die Handsteuerung. Wenn die Handsteuerung defekt ist, muss sie ersetzt werden. Wenden Sie sich an einen Kundendienstmonteur.

**Wenn nichts passiert**, wenn die „nach oben“- oder „nach unten“-Taste auf der Handsteuerung gedrückt wird.

1) Der Liftermotor ist überhitzt. Warten Sie eine Weile und versuchen Sie es erneut. 2) Der Lifter ist überlastet. Senken Sie den Lifter mittels des Notabsenknopfes ab.

**Wenn nichts passiert**, wenn die „nach oben“- oder „nach unten“-Taste auf der Handsteuerung gedrückt wird.

1) Ladevorgang läuft. Ladevorgang unterbrechen.

**Wenn nichts passiert**, wenn die „nach oben“-Taste auf der Handsteuerung gedrückt wird.

1) Der Lifter befindet sich in seiner maximalen oberen Position. Drücken Sie die „nach unten“-Taste an der Handsteuerung.


**Wenn nichts passiert**, wenn die „nach unten“-Taste auf der Handsteuerung gedrückt wird.

1) Der Lifter befindet sich in seiner maximalen unteren Position. Drücken Sie die Taste „nach oben“ auf der Handsteuerung, um den Lifter anzuheben. 2) Der Lifter ist entladen. Ziehen Sie leicht am Band oder hängen Sie einen Hebebügel ein und drücken Sie die „nach unten“-Taste auf der Handsteuerung nach unten, um ihn abzusenken.


## Im Notfall

### Notstopp und Absenken

**Notstopp** - Im Notfall kann der Notstopp durch Ziehen der roten Schleife aktiviert werden. Diese Aktion bringt den Lifter sofort zum Stillstand und lässt den roten Knopf hervortreten. Um den Notstopp zurückzusetzen, drücken Sie den roten Knopf wieder hinein.

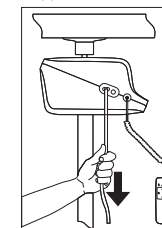

### Notstopp zurücksetzen

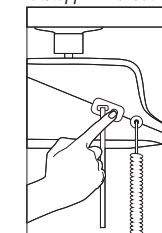

**Sicherheitsabsenkung** - Ziehen Sie zunächst am roten Band, um den Notstopp zu aktivieren. Ziehen Sie danach an dem roten Band und halten Sie es fest; dadurch wird die Sicherheitsabsenkung aktiviert. Die Sicherheitsabsenkung darf nur in Notsituationen verwendet werden, da man leicht die Kontrolle über den Lifter verlieren und sich dabei verletzen kann.

**Notabsenkung** - Sollte ein Stromausfall oder eine elektrische Störung (im produkt) auftreten, während sich die pflegebedürftige Person im Lifter befindet, wird die Notabsenkung aktiviert, und die Person fährt sicher und zuverlässig nach unten. Je nach Gewicht der pflegebedürftigen Person muss die Pflegekraft das Herunterziehen der Person unterstützen.



Pflegebedürftige Personen mit einem Herzschrittmacher sollten die Handsteuerung wegen des Magnetfeldes von ihrem Oberkörper fernhalten (Mindestabstand 153 mm).



**Wichtig!** Diese Kurzanleitung ersetzt nicht das Benutzerhandbuch. Die neueste Version kann unter [www.humancaregroup.com](http://www.humancaregroup.com) heruntergeladen werden.  
**Lesen Sie vor der Verwendung alle Anweisungen!**